

HIFU 12D

TECNOLOGÍA ESTÉTICA AVANZADA

FACIAL • CORPORAL

Belleza avanzada. Resultados personalizados.

4 MANÍPULOS • 12 CARTUCHOS

Innovación • Confianza • Resultados



MANÍPULO HIFU MULTILÍNEA



20.000 DISPAROS



8 CARTUCHOS



TRAZADO MULTILÍNEA

Aplicación uniforme por zonas

FACIAL: 1,5 · 2,0 · 3,0 mm



1,5 mm



2,0 mm



3,0 mm

CORPORAL: 3,0 · 4,5 · 6,0 · 9,0 · 12,0 mm



3,0 mm



4,5 mm



6,0 mm



9,0 mm



12,0 mm



MANÍPULO HIFU 360° FACIAL



40.000 DISPAROS



2 CARTUCHOS: 1,5 Y 3,0 mm



TRAZADO LINEAL 360°

Favorece la firmeza de la piel



Aplicación precisa en rostro y cuello



MANÍPULO LIPO-HIFU



600 DISPAROS



2 CARTUCHOS:
8,0 Y 13,0 mm




24 × 24 LÍNEAS

Amplia zona de tratamiento



**TRATAMIENTO
CORPORAL**

MANÍPULO DEP

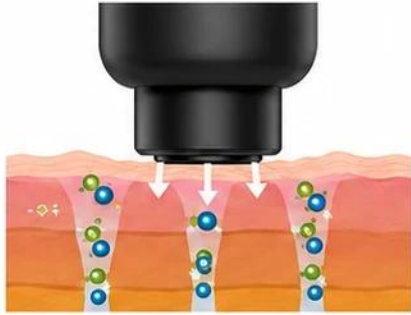

- PIEL
- ACTIVOS COSMÉTICOS
- CANALES ACUOSOS

APLICACIÓN NO INVASIVA

Favorece la penetración de activos cosméticos



APLICACIÓN FACIAL

Distribución uniforme de los activos




Tratamiento cómodo y localizado



RESULTADOS ANTES Y DESPUÉS

COMPARATIVAS FACIALES Y CORPORALES

FACIAL

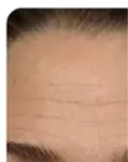

Antes




Después




Antes




Después

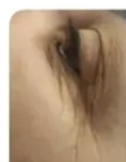

Antes

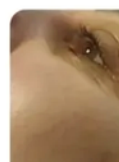

Después

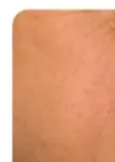


Antes




Después

CORPORAL

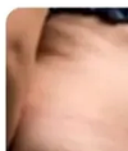


Antes

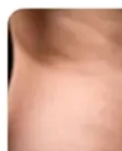


Después




Antes

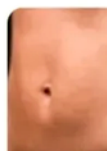

Después

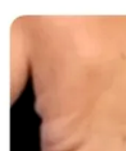

Antes

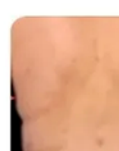

Después



Antes



Después

PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO

GUÍA PROFESIONAL HIFU 12D

ORIENTACIÓN POR ZONA

CARA Y CUELLO 300-400 disparos

BRAZOS

200-300 disparos

PIERNAS

300-400 disparos

ABDOMEN

40 disparos

HIFU MULTILÍNEA

FACIAL · UNA SOLA LÍNEA

MEJILLA Prueba 0,3 J · 0,7-1,2 J · 3,0 mm

CONTORNO DE OJOS Prueba 0,3 J · 0,7-1,2 J · 2,0 mm

FRENTE Prueba 0,3 J · 0,7-1,2 J · 1,5 mm

CARTUCHO MULTILÍNEA

CUELLO 0,5 J prueba · 1,0-1,5 J · 4,5 mm · 6 líneas

BRAZOS 1,1-1,5 J · 6,0 mm · 8-10 líneas

PIERNAS 1,5-2,0 J · 6,0 mm · 9-12 líneas

ABDOMEN 1,5-2,0 J · 6,0/9,0 mm · 9-12 líneas

HIFU 360°

MODO 1

Contorno de ojos y nariz. Prueba: 0,5 J. Rango orientativo: 0,8-1,5 J.

MODO 2

Esquina del ojo y comisura de la boca. Aplicación vertical y deslizante.

MODO 3

Labio superior: 0,5-0,7 J con guía deslizante.

LIPO-HIFU

ABDOMEN

1,0-1,5 J

8,0 mm: menor espesor adiposo.

13,0 mm: mayor espesor adiposo.

CUERPO

8,0/13,0 mm · 10-16 disparos orientativos por zona.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

HIFU 12D FACIAL • CORPORAL

	Modelo:	HIFU 12D
	Aplicación:	Facial y corporal
	Pantalla:	Táctil a color
	Energía:	0,1 - 3,0 J
	Modos de trabajo:	Automático y manual



4 MANÍPULOS

HIFU Multilínea • HIFU 360° • DEP • LIPO-HIFU



12 CARTUCHOS

HIFU Multilínea: 1,5 • 2,0 • 3,0 • 4,5 • 6,0 • 9,0 • 12,0 mm

HIFU 360°: 1,5 y 3,0 mm

LIPO-HIFU: 8,0 y 13,0 mm • 24 × 24 líneas



Alimentación: | 220 V • 50/60 Hz



Innovación • Confianza • Resultados

